

I denna sortimentsöversikt kommer hjullyft visas. För frågor/sortiment om **taklyft** kontakta taklyftar.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se

Riktlinje personlyft: <https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/forskrivningsprocessen/forteckning-och-riktlinjer/>

Övergripande lyftbyglar: Lyftbygels design och bredd påverkar användarens komfort, stöd och understödsyta från lyftselen i lyften. För att kunna välja bygel har DHC tagit fram en sortimentsöversikt som heter **Lyftbyglar och stöd i bygelval**.

Upphandling: Tillsammans med 7-klövern upphandlar Dalarnas Hjälpmedelscenter hjälpmedel för Dalarna, Örebro, Sörmland, Västmanland, Värmland, Gävle och Uppsala. Under nuvarande upphandlingsperiod har vi fått ta in en ny personlyft pga svårigheter med att ta fram elektronikkomponenter.

Ersättningsgrupper: Hjullyftarna ligger i ersättningsgrupp för att äldre sortiment ska kunna fortsätta cirkulera, och att DHC ska kunna tillhandahålla hjullyftar till Dalarnas befolkning.

Artikel	Benämning ▲	Lager	Benämning	Rekond.lager	Benämning	Ersättningsgrupp	Ny	Rangor
40602	Hjullyft el Uno 102 EE 175kg inkl snabbkoppling bygel	200	Huvudlager Falun/Borlänge			Team 09: Hjullyft standard	☐	1
44330	Hjullyft el GL5 205kg inkl omlottbygel	200	Huvudlager Falun/Borlänge			Team 09: Hjullyft standard	☐	2
45515	Hjullyft el Uno 102 EE 175kg version 2 inkl snabbkoppling u bygel	200	Huvudlager Falun/Borlänge			Team 09: Hjullyft standard	☐	3
50654	Hjullyft el GL5 2.0 205kg exkl bygel (inkl nätkabel 554250)	200	Huvudlager Falun/Borlänge			Team 09: Hjullyft standard	☐	4
54328	Hjullyft el GL5.1 205kg exkl bygel (inkl nätkabel 558363)	200	Huvudlager Falun/Borlänge			Team 09: Hjullyft standard	☐	5
57669	Hjullyft el GL5.1 205kg mek nödsänkning exkl bygel (inkl nätkabel 558363)	200	Huvudlager Falun/Borlänge			Team 09: Hjullyft standard	☐	6
58962	Hjullyft el GL5.2 205kg mek nödsänkning exkl bygel (inkl nätkabel 558363)	200	Huvudlager Falun/Borlänge			Team 09: Hjullyft standard	☒	7

Hjullyft GL5 från Goldmann: Vi har nu många olika varianter på GL5 i omlopp, de har samma grundkonstruktion men är utrustade med olika elektronik och med/utan mekanisk nödsänkning. Därför finns det olika LDHnr för att särskilja dessa personlyftar från varandra för spårbarhet och vid felsökning.

Viktigt att läsa bruksanvisningen då det är olika elektronik på de olika GL5 lyftarna vilket medför olika batterier och förfarnaden gällande laddning/nödstopp/nödsänkning m.m.

LDHnr 58962 Hjullyft GL5.2 205kg mekanisk nödsänkning exkl bygel

LYFTBYGLAR

LDHnr 50078 Lyftbygel GH3 340mm omlottkrokar

LDHnr 50079 Lyftbygel GH3 440mm omlottkrokar

LDHnr 50080 Lyftbygel GH3 530mm omlottkrokar

LDHnr 47613 Kryssbygel GH3 kryss 250kg

LDHnr 58899 Kryssbygel GH3 kryss 400kg **OBS! NY**



Aktivera nödstopp

Om lyftanordningen är i rörelse och inte svarar på funktionerna som aktiveras med handkontrollen, tryck på den röda knappen ovanpå batteriet. När nödstoppfunktionen har aktiverats fungerar inte lyftanordningen. För att frigöra nödstoppet tar du bort batteriet genom att använda tummen och pekfingeret för att trycka på knapparna på batteriets sidor och dra ut batteriet. Se sedan till att trycka batteriet på plats.

Nödsänkningfunktionen

Om lyftanordningen inte sänks ned ska du aktivera följande: Tryck på pilknappen på kontrollboxen. Detta fungerar som nödsänkning om handkontrollen inte fungerar. Om lyftbommen inte sänks Vrid den röda knappen på lyftbommen i pilens riktning.

Förvaring av mobil lyft Den mobila lyften måste förvaras i ett torrt utrymme med en relativ luftfuktighet som inte överskrider 70 %. Den mobila lyften får inte förvaras i badrum eller liknande våtutrymmen.

Batterier

De batterier som medföljer lyften är inte helt fulladdade vid leverans. Batteripaket måste laddas före användning. Det rekommenderas att de laddas upp helt. Detta tar cirka 4 timmar.

Starta lyften

Efter att strömkabel kopplats bort från elnätet tar det upp emot 15 sek innan lyften aktivt kan användas pga att under uppstarten genomförs en batterikapacitetsmätning.

Stand by

Lyftanordningen går i standby-läge efter 2 minuter utan användning.

Maxbrukarvikt: 205kg

Lyfthöjd min/max: 431/1734mm

Lyftens längd: 1372mm

Breddjustering: 530/1300mm

Hjuldimension: 80mm

Brukarmanual: https://www.guldmann.com/media/6723/manual-gl5-2_se.pdf

Teknisk dokumentation: https://www.guldmann.com/media/6695/datasheet_mobil-lifter-gl5-2_80mm_se.pdf

Quick Guide: https://www.guldmann.com/media/6758/gl5-2_quick-guide_se.pdf

Äldre sortiment i ersättningsgruppen

LDHnr **57669** Hjullyft GL5.1 205kg mekanisk
nödsänkning exkl bygel

Maxbrukarvikt: 205kg
Lyfthöjd min/max: 431/1734mm
Lyftens längd: 1372mm
Breddjustering: 530/1300mm
Hjuldimension: 80mm
Linakelektronik



LDHnr **54328** Hjullyft GL5.1 205kg exkl bygel

OBSERVERA ATT DENNA HJULLYFT ÄR EXKL MEKANISK NÖDSÄNKNING

Maxbrukarvikt: 205kg
Lyfthöjd min/max: 431/1734mm
Lyftens längd: 1372mm
Breddjustering: 530/1300mm
Hjuldimension: 80mm
Linakelektronik



LDHnr **50654** Hjullyft el GL5 2.0 205kg exkl bygel

Maxbrukarvikt: 205kg
Lyfthöjd min/max: 431/1734mm
Lyftens längd: 1372mm
Breddjustering: 530/1300mm
Hjuldimension: 80mm
Linakelektronik

LDHnr 45515 Hjullyft el Uno 102 EE 175kg ver2 inkl
snabbkoppling u bygel

Maxbrukarvikt: 175kg
Lyfthöjd min/max: 520/1790mm
Lyftens längd: 1255mm
Breddjustering: 580/980mm
Hjuldimension: 75mm
Lyftbyglar som finns i olika bredder:
LDHnr 45510 Universalbygel 350mm
LDHnr 45511 Universalbygel 450mm
LDHnr 45512 Universalbygel 600mm
LDHnr 31218 Lyftbygel Twin 670mm



Leverantör: Hill-room

Lyftpelaren kan sättas i tre olika nivåer beroende på vilket lyftområde man behöver.

Bruksanvisning: <https://www.hill-rom.se/globalassets/website-documentation/international-websites/sweden-se/patient-handling/mobile-lifts/uno-100102/uno-102-bruksanvisning-7sv150104-rev-6.pdf>

LDHnr **44330** Hjullyft el GL5 205kg inkl omlottbygel

Maxbrukarvikt: 205kg
Lyfthöjd min/max: 431/1734mm
Lyftens längd: 1322mm
Breddjustering: 530/1300mm
Hjuldimension: 80mm

